



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna

Policlinico S. Orsola-Malpighi



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

SCHEDA INFORMATIVA N° 04

MODALITA' DI INDOSSAMENTO DEI FACCIALI FILTRANTI



SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
VIA MASSARENTI, 9 - 40138 BOLOGNA
☎ 051.63.614.585-FAX 051.63.64.587

E-mail: spp@aosp.bo.it

MODALITA' DI INDOSSAMENTO DEI FACCIALI FILTRANTI


I - INTRODUZIONE

L'utilizzo degli APVR (apparecchi di protezione delle vie respiratorie) è subordinato, per la legislazione vigente, ad un corso di addestramento che istruisca l'utilizzatore sulle nozioni fondamentali d'uso dei diversi APVR e sulle corrette modalità di indossamento.

Questa scheda informativa nasce come supporto per il personale che deve usare tali dispositivi, e riassume in maniera organica le informazioni necessarie per un corretto indossamento degli APVR, senza

ovviamente sostituire i previsti corsi di addestramento che dovranno contenere tutte le informazioni necessarie anche ad un corretto utilizzo.

Per quanto riguarda la scelta e le caratteristiche degli APVR da utilizzare si rinvia alla scheda tecnica n° 15 prodotta dal Servizio di Prevenzione e Protezione ed al catalogo aziendale dei dispositivi di protezione individuale (documento contenente la tipologia, la classificazione e attività per i quali ne è previsto l'uso di tutti i dispositivi di protezione individuale disponibili in azienda. Le indicazioni illustrate devono essere effettuate in modo sequenziale così come sono descritte.

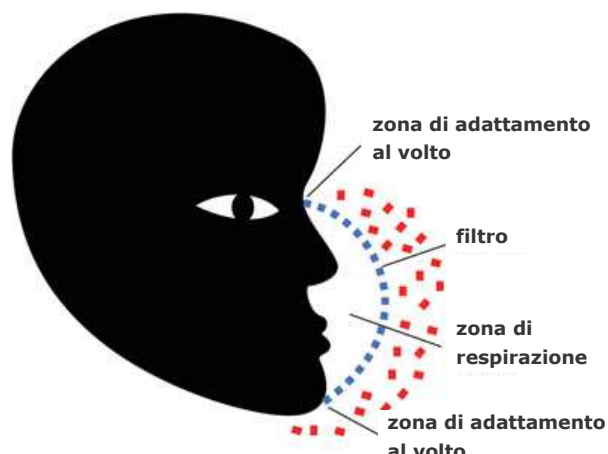

II - MODALITA' DI INDOSSAMENTO DEI FACCIALI FILTRANTI

Prima dell'indossamento

- Leggere la nota informativa del DPI ogni volta che viene sostituita marca e/o modello e comunque tutte le volte in cui si hanno dei dubbi sulle modalità di impiego e indossamento
- Seguire le informazioni specifiche per l'indossamento previste all'interno della nota informativa (ogni APVR può presentare alcune piccole differenze che possono rivelarsi fondamentali)
- Manipolare il DPI solamente con le mani pulite
- Verificare che il dispositivo sia integro e pulito
- Indossare i dispositivi solamente su viso privo di barba, baffi e basette e ben rasato, in quanto la presenza di peli facciali non consente di garantire una corretta tenuta del DPI

Indossamento

1- indossare solamente facciali filtranti che si trovano nella confezione originale integra



2 - se si indossano gli occhiali toglierli



3 - aprire il facciale “a conchiglia” e preformare ad arco la barretta metallica posta nella parte superiore

4 - portare entrambi gli elastici sulla parte anteriore del facciale



5 - appoggiare il facciale sul viso posizionando la parte inferiore al disotto del mento e il nasello preformato sul naso

6 - portare l’elastico inferiore dietro la testa al disotto delle orecchie e quello superiore alla sommità del cranio



7 - adattare lo stringinaso alla conformazione del viso impiegando contemporaneamente tutte e due le mani e aggiustare la posizione del facciale sul viso fino ad avere la sensazione che non ci siano tensioni o pieghe nei punti di tenuta lungo il bordo

8 - verificare la tenuta del facciale poggiando entrambe le mani sul dispositivo per tenerlo in posizione ed inspirare o espirare rapidamente, a seconda che si tratti di un dispositivo con o senza valvola, a seguito di tale prova non si devono percepire perdite d'aria dai bordi



9 - indossare gli eventuali occhiali da vista posizionando il naselli sopra al facciale filtrante

10 - indossare gli occhiali a visiera posizionandoli in maniera che non compromettano la tenuta del facciale



11 - accertarsi che i dispositivi siano stati indossati in maniera tale da garantire la protezione richiesta



Rimozione e smaltimento del facciale

1 - togliere solo un guanto seguendo le modalità descritte nella scheda informativa n° 2

2 - tenere calzato il secondo guanto in modo che la mano nuda possa operare sulle zone “pulite” e quella guantata sui dispositivi eventualmente “sporchi”



3 - togliere gli occhiali a visiera, afferrando l’elastico a contatto del capo con la mano nuda e il corpo maschera con la mano protetta dal guanto



4 - togliere gli eventuali occhiali da vista, sempre con la mano nuda



5- con la mano nuda afferrare gli elastici e portarli davanti al viso mentre con la mano ancora guantata afferrare e trattenere il facciale allontanandolo poi dal volto.



6 - eliminare il facciale, togliere il guanto e lavarsi accuratamente le mani

N.B. Tutti i dispositivi monouso devono essere smaltiti secondo le modalità, previste per i rifiuti, nelle istruzioni operative aziendali.

Nel caso di manipolazione di antiblastici vedi le schede informative 1 e 3

Non riutilizzare il dispositivo una volta tolto anche se non mostra segni di imbrattamento

A cura di : B. Diano
R. Taruffi